

la belle BC

bruckhoff
hannover**Dijital sesler dünyasına hoşgeldiniz!**

Öncelikle sizi tebrik etmek isteriz. Bu cihazı satın almakla, „Alman Malı“ süper kalite bir ürün edinmiş oldunuz. Kullanma talimatı size ve çocuğunuza bu aleti hızla öğrenme imkanını tanıyacaktır. Bu ürünle hoşça vakit geçirmenizi temenni ederiz.

bruckhoff
hannover**Genel kullanım ve bakım talimatları****■ Cihaz bakımına ilişkin talimatlar**

İşitme cihazı akustikçiniz çeşitli bakım maddeleri sunmaktadır. Temizlerken cihazın içine sıvı kaçmamasına dikkat ediniz.

■ Günlük kullanıma ilişkin bazı tavsiyeler:

- Cihazı aşırı sıcak ve nemden koruyunuz.
- Cihazı yere düşürmekten kaçınınız.
- Cihazı uzun süre kullanmayacaksanız pilini çıkarınız.

■ Aşağıda sıralanan faaliyetler sırasında cihazı çıkarınız:

- Banyo yaparken veya duş alırken
- Saç kurutma bonesi ya da fön makinesi kullanacaksanız
- Saç spreyi kullanacaksanız
- Hasta olarak yüksek frekans veya ultrason cihazlarında tedavi ya da muayene edilmeniz gerekirse

■ İmha etme

Eskimiş cihazı ve eski pilleri normal ev çöpüne atarak imha etmeyiniz. İşitme cihazı akustikçiniz, cihazı memnuniyetle usulüne uygun biçimde imha edecektir.

**■ Servis ve garanti**

Cihazınızın bozulması halinde, aşağıda sıralanan noktaları gözden geçirdikten sonra, işitme cihazı akustikçinize başvurunuz:

- Cihaz açık mı? • Yeni pil takıldı mı?

Cihazda kendi başınıza tamir yapmaya kalkışmayınız.

! Genel uyarılar

- Pilleri çocuklardan ve ev hayvanlarından uzak tutunuz. Yutulmaları halinde sağlığa zararlıdır. Hemen bir doktora götürünüz.
- Patlama tehlikesi altında olan yerlerde kullanmayınız.
- Sadece size özel işitme cihazlarınızı kullanınız. Başka cihazlar kullanılması halinde bunlar etkili olmayabileceği gibi, işitme yeteneğine de zarar verebilirler.
- Röntgen ışınları cihaza zarar verebilir.
- Geri beslemeli uyarı sinyalleri, multi mikrofon teknolojili işitme cihazlarında muhtemelen yetersiz algılanacaktır.



B07079 | 0310

0123

la belle BC

AUDIA AKUSTIK GMBH
Herrenstraße 6
30159 Hannover
Almanya

Telefon: +49 (0) 511-167 00-0
E-Mail: service@bruckhoff.com


www.bruckhoff.com

bruckhoff
hannover


Kılavuzu

Kullanım kısmı

İşitme cihazının kullanım kısmı ile bir takım özel fonksiyonları kendinizin kolayca ayarlaması mümkün olmaktadır.

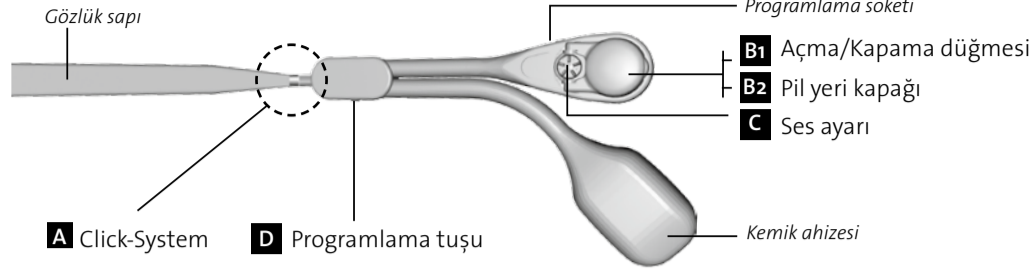

A


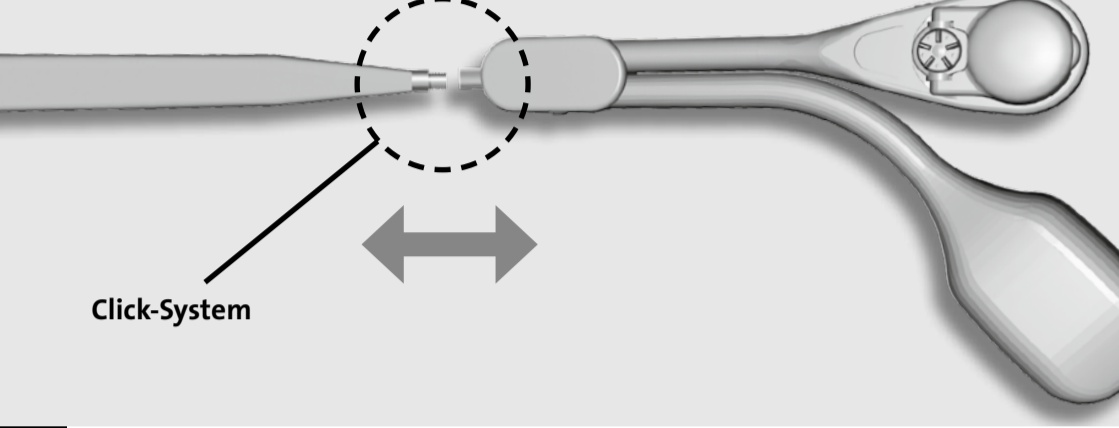


B1

B2

İşitme cihazının açılması/kapatılması

İşitme cihazının açılması/kapatılması son derece kolaydır. Pil yeri kapağı kapalı olduğunda cihaz otomatik olarak açık durumdadır. Cihazı, pil yeri kapağını açmak suretiyle kapatabilirsiniz.

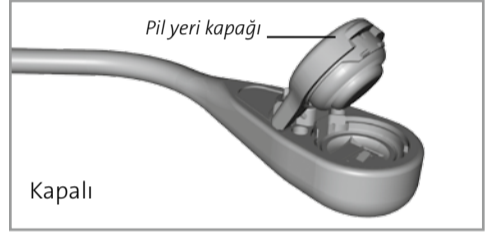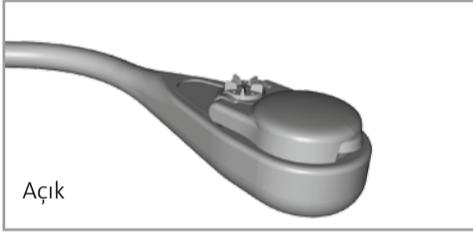



1. Pilin çıkarılması

Pil yeri kapağını açınız. Pili cihaz beraberindeki mıknatıslı kalem ile pil yeri kapağından çıkarınız.



2. Pilin takılması



Yeni pili (Model: 312) "+" işareti üste gelecek şekilde mahfazasına veya mıknatıslı pil yeri kapağına takınız ve kapağı kapatınız – Böylelikle işitme cihazı otomatik olarak açık konuma gelecektir!

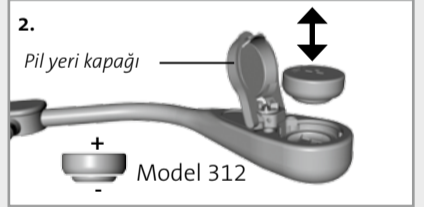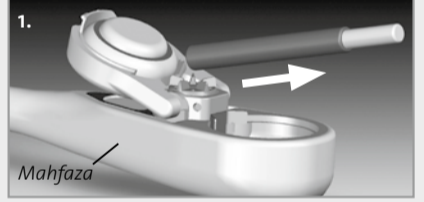

C

Ses ayarı

Ses ayar düğmesi ile tamamen kişisel arzuunuza göre cihazın sesini istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

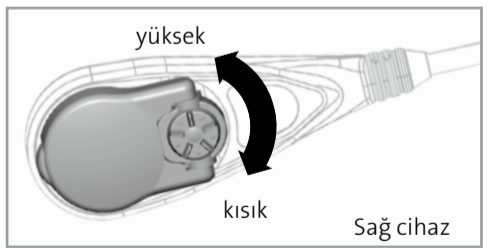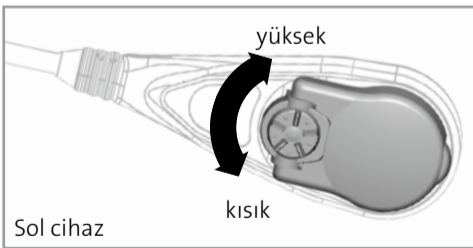

D

Programlama tuşu

Programlama tuşuna basmak suretiyle işitme cihazı akustikçiniz tarafından belirlenen işitme programlarını ayarlayabilirsiniz.

