

la belle  
la belle<sup>2</sup>

**bruckhoff**  
hannover



**bruckhoff**  
hannover

## Wij verwelkomen u in de wereld van het digitale horen.

*Eerst en vooral willen we u hartelijk feliciteren. Met dit apparaat hebt u een Duits topproduct 'Made in Germany' gekocht.*

*Deze gebruiksaanwijzing helpt u en uw kind er snel mee vertrouwd te raken.*

*Wij wensen u alvast veel plezier met dit product.*

## Algemene gebruiks- en onderhoudsaanwijzing

### ■ Richtlijnen voor het onderhoud van het apparaat

Uw verdeler van hoorapparaten kan u verscheidene onderhoudsmiddelen aanbieden. Let er bij het reinigen op dat er geen vloeistof in het apparaat loopt.

### ■ Enkele tips voor het dagelijkse gebruik:

- Bescherm het apparaat tegen hitte en vochtigheid.
- Laat uw apparaat niet op de grond vallen.
- Verwijder de batterij als u het apparaat gedurende een lange periode niet gebruikt.

### ■ Zet het apparaat af bij een van volgende activiteiten gaat:

- als u zich gaat wassen of douchen
- als u een droogkap of haardroger gebruikt
- als u haarspray gebruikt
- als u als patiënt met hogefrequentiegolven of ultrasone golven behandeld wordt

### ■ Afvalverwerking

Een oud apparaat en oude batterijen mag u niet bij het huisvuil werpen. Uw verdeler van hoorapparaten zal deze graag vakkundig voor u verwerken.



### ■ Service en garantie

Mocht uw apparaat niet functioneren, wend u dan tot uw verdeler van hoorapparaten, nadat u eerst de volgende punten gecontroleerd hebt:

- Is het apparaat ingeschakeld?
- Werd er een nieuwe batterij geplaatst?

**Probeer niet om zelf herstellingen aan het apparaat uit te voeren.**

## ⚠ Algemene waarschuwingen

- Batterijen buiten het bereik van kinderen houden. Indien batterijen worden ingeslikt, kunnen zij een gevaar voor de gezondheid betekenen. In zulk geval dient u onmiddellijk een arts te waarschuwen.
- Niet in ruimtes met explosiegevaar gebruiken.
- Enkel voor u persoonlijk bestemde hoorapparaten gebruiken. Andere apparaten kunnen geen werking hebben of het gehoor beschadigen.
- Röntgenstralen kunnen het apparaat beschadigen.
- Waarschuwingssignalen die van achteren komen kunnen bij hoorapparaten met multimicrofoonstechniek soms ontoereikend waargenomen worden.

AUDIA AKUSTIK GMBH  
Herrenstraße 6  
30159 Hannover  
Duitsland

Tel: +49 (0) 511 - 167 00 - 0  
Fax: +49 (0) 511 - 167 00 - 50  
service@bruckhoff.com

[www.bruckhoff.com](http://www.bruckhoff.com)



la belle  
la belle<sup>2</sup>

**bruckhoff**  
hannover

# Gebruiksaanwijzing

## De drie hoofdelementen van de hoorbrillen la belle en la belle 2

1 De bril met brilbeugel 2 Click-System 3 Hoormodule met 3.1 bedieningsdeel.  
De hoormodule kan met het **click-system** eenvoudig worden opgestoken of afgetrokken.

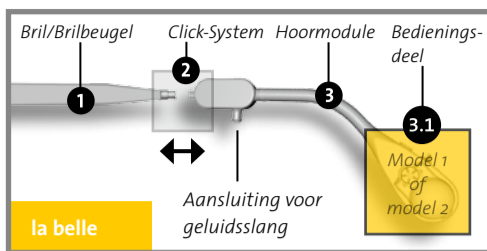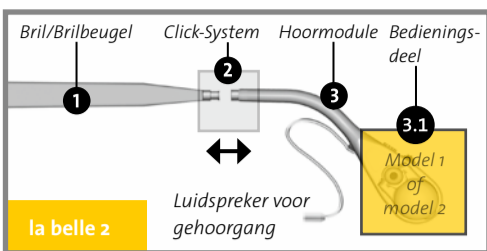


## Functie van het bedieningsdeel voor ...

3.1


## ... la belle en la belle 2

### De hoorprogramma-toets (Model 1)

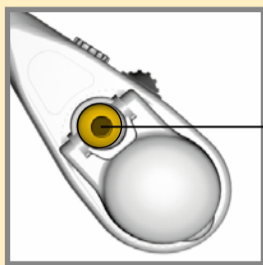

De hoor-programmatoets


### De hoorprogramma-toets (Model 2)

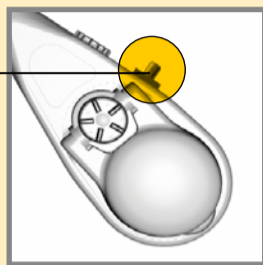

De hoor-programmatoets


Door op **de hoorprogramma-toets** te drukken, stelt u het door uw verdeler van hoorapparaten vastgelegde akoestische type in.

### De geluidsterkteregelaar (Model 1)

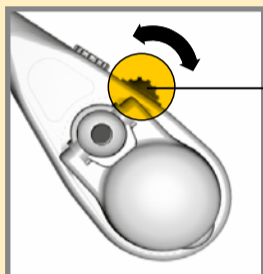

De geluidsstekteregelaar

### De geluidsterkteregelaar (Model 2)

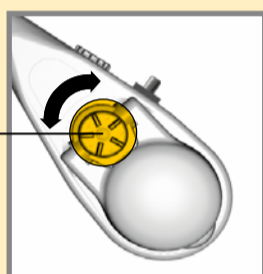


De geluidsstekteregelaar

Met de geluidsterkteregelaar kan u volledig naar eigen wens de gewenste geluidsterkte voor uw apparaat instellen.

**Opgelet:** Niet alle modellen beschikken over een geluidsterkteregelaar of hoorprogramma-toets.

## Aan-/ uitschakelaar, Batterijdeksel (alle modellen)

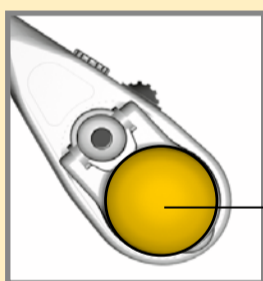

Aan-/ uitschakelaar, Batterijdeksel




**Bij alle hoormodules gelijk:** Het in- en uitschakelen van het hoorapparaat is uiterst eenvoudig. Als het batterijdeksel gesloten is, is het apparaat automatisch ingeschakeld. Door gewoon het batterijdeksel te openen, wordt het apparaat uitgeschakeld.

## Batterij verwijderen (alle modellen)




### Handleiding:

Open het batterijdeksel. Verwijder de batterij met de bijgevoegde magneetstift uit het batterijdeksel.

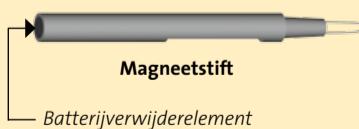

## Batterij plaatsen (alle modellen)

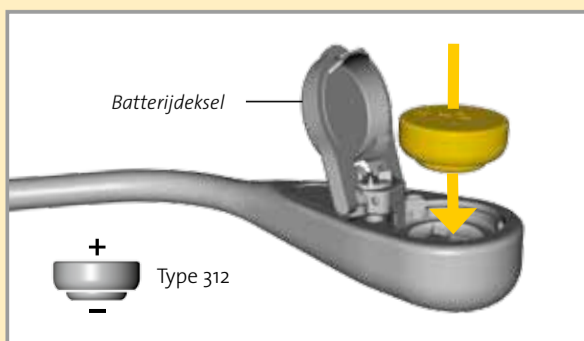

### Handleiding:

Plaats de nieuwe batterij (type 312) met de pluskant naar boven in de behuizing of het magnetische batterijdeksel en sluit het deksel – het hoorapparaat is nu automatisch ingeschakeld.

Let op: Bij een CROS en BiCROS systeem heeft u 2 batterijen van het type 312 nodig.