



B17005 - 8/17

Händlerstempel

AUDIA AKUSTIK GMBH
Herrenstraße 6
30159 Hannover
Deutschland
Tel: +49 (0) 511 16700-0
E-Mail: service@bruckhoff.com
www.bruckhoff.com



Wir verstehen Hören.

Ein- / Ausschalten des Gerätes

la belle

la belle

junior

headset

Bei allen Bedienteilen gleich:
Bei geschlossenem Batteriedeckel ist Ihr Hörgerät immer automatisch eingeschaltet.

Durch einfaches Öffnen des Batteriedeckels schalten Sie das Hörgerät aus.



Batteriedeckel zu

Eingeschaltet



Batteriedeckel offen

Ausgeschaltet

Wechseln der Batterie

la belle


la belle

junior

headset

Bei allen Bedienteilen gleich:
Öffnen Sie den Batteriedeckel.
Entfernen Sie die Batterie mit dem beiliegendem Magnetstift.

Das Einsetzen erfolgt genau anders herum:
Setzen Sie die neue Batterie Typ 312 mit dem "+"-Zeichen nach oben ein. Schließen Sie den Deckel. Das Hörgerät ist wieder automatisch eingeschaltet!

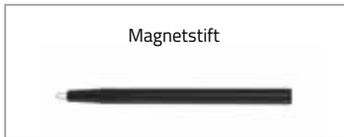

Magnetstift



Batterie
Typ 312 Standard*

* Optional:
Batterie
Typ 13



Sicherheits-, Pflege- und Gebrauchsinformationen. Bitte vor dem Gebrauch lesen!



Ihr Hörgerät stellt weder das normale Gehör wieder her noch verhindert oder verbessert es eine organisch bedingte Hörminderung.

Sicherheits- und Warnhinweise

- Ihr Hörgerät darf nicht von anderen Personen getragen werden. Es besteht die Gefahr einer Hörschädigung.
- Nicht genehmigte Modifikationen am Hörgerät können Ihr Gehör schädigen.
- Tragen Sie Ihr Hörgerät niemals in Bereichen wo Explosionsgefahr besteht.
- Bewahren Sie das Hörgerät außerhalb der Reichweite von Kleinkindern, Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung und Haustieren auf. Das Verschlucken von Hörgeräteeilen, insbesondere von Batterien ist lebensgefährlich. Es droht Erstkingungsgefahr. Suchen Sie im Ernstfall sofort einen Arzt oder ein Krankenhaus auf.
- Bei Schmerzen in oder hinter dem Ohr sowie bei vermehrtem Ohrschmalz, wenden Sie sich an Ihren Hörgeräteakustiker oder Arzt.
- Hörgeräte sollten bei Kunden mit perforierten Trommelfellen, entzündeten Ohrkanälen oder anderweitig freiliegenden Mittelohr-Kavitäten nicht mit einem Dome oder Cerumenschutz-System angepasst werden. In diesen

Fällen empfehlen wir die Verwendung eines maßgefertigten Ohrpassstücks. Im eher unwahrscheinlichen Fall, dass der Dome im Gehörgang zurückbleibt, empfehlen wir den Besuch eines Fachmediziners.

- Hörprogramme im Richtmikrofonmodus reduzieren vor allem Hintergrundgeräusche. Von hinten kommende Warnsignale oder Geräusche, werden nicht oder nur schwach wahrgenommen.
- Verbinden Sie Ihr Hörgerät niemals über ein Kabel mit einem externen Audiogerät, wie einem Radio usw. Dies kann zu körperlichen Verletzungen führen (Elektroschock).
- Die Nutzung eines Hörgerätes durch Personen mit aktiv implantiertem medizinisches Gerät (z.B. Herzschrittmacher, Defibrillator, usw.) bedarf einer vorherigen Absprache und Abklärung mit einem Facharzt. (Weitere Hinweise hierzu finden Sie auch auf unserer Internetseite unter www.bruckhoff.com/Sicherheitshinweise)

Hinweise zur Produktsicherheit, zum Gebrauch und zur Pflege

Ihr Hörgerät ist sehr robust und kann bei allen normalen Alltagsaktivitäten, kurzzeitig auch unter extremen Bedin-

gungen, getragen werden.

- Bitte tauchen Sie es nie unter Wasser oder benutzen es beim Duschen, Baden oder Schwimmen. Die Hörgeräteelektronik würde beschädigt.
- Mikrofoneingänge niemals nass reinigen. Sie verlieren dadurch ihre speziellen akustischen Eigenschaften.
- Schützen Sie Ihr Hörgerät vor Hitze.
- Zum Trocknen keine Mikrowelle oder andere Heizungsgeräte benutzen.
- Der Dome muss alle drei Monate, bzw. sobald er hart oder brüchig wird, gewechselt werden. So wird ein unbeabsichtigtes Ablösen des Domes beim Einführen und Herausnehmen aus dem Ohr vermieden.
- Nicht genutzte Hörgeräte möglichst mit offenem Batteriefach ablegen, so dass Feuchtigkeit austreten kann.
- Bei langfristiger Nichtnutzung entnehmen Sie die Batterie.
- Bewahren Sie das Hörgerät immer an einem sicheren, trockenen und sauberen Ort auf
- Lassen Sie es nicht fallen!
- Schwache oder defekte Batterien (z.B. Flüssigkeitsverlust) immer sofort wechseln. Verwenden Sie stets neue Batterien.
- Alte Batterien nicht im Hausmüll entsorgen. Ihr Hörgeräteakustiker entsorgt

diese fachgerecht für Sie.


- Verwenden Sie nur Batterien mit max. 1,5 Volt.
- Verwenden Sie niemals Silber-Zink- und Lithium-Ionen-Akkus.
- Einige (Zahn-)medizinische Untersuchungen mit Röntgenstrahlen, wie z.B. CT-Untersuchung, MRT/NMRT, können die Funktionstüchtigkeit Ihres Hörgeräts beeinträchtigen. Legen Sie Ihr Hörgerät vorher ab.
- Vor dem Passieren einer Sicherheits-schleuse (z.B. am Flughafen) müssen Hörgeräte nicht abgenommen werden. Die dort abgegebene geringe Röntgenstrahlung beeinträchtigt Ihr Hörgerät nicht.
- Verwenden Sie Ihr Hörgerät generell nicht an Orten, an denen elektronische Hilfsmittel verboten sind.

Ausführliche Hinweise finden Sie im Internet unter www.bruckhoff.com/Sicherheitshinweise Im Zweifelsfall wenden Sie sich an Ihren Hörgeräteakustiker oder einen Facharzt.

Stecken Sie das la belle-Hörmodul **(1)** an Ihren Brillenbügel. Nutzen Sie Ihre Brille ohne Hörgerät – mit dem ansteckbaren Brillenendstück **(2)**.

Das Kinder-Hörsystem junior **(3)** wird über zwei Druckknöpfe **(4)** mit dem Stirnband verbunden.

(5) Das headset-Hörsystem passen Sie bequem über die Weitenverstellung **(6)** Ihrer Kopfform an.

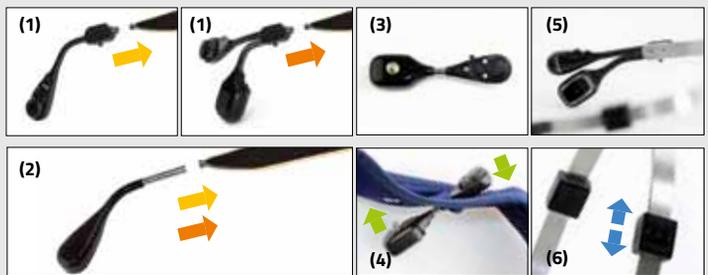

Einstelloptionen am Bedienteil 1

Es gibt 5 Bedienteil-Versionen, die sich in der Bedienbarkeit leicht unterscheiden.

Luftleitung

la belle (mit/ohne Außenhörer)

Folgende Funktionen können Sie selber einstellen:

- Einstellung der Lautstärke
- Auswählen der Hörprogramme
- Ein-/Ausstellen des Gerätes: siehe Anleitung andere Seite




Einstelloptionen Bedienteil 2

Luftleitung

la belle (mit/ohne Außenhörer)

Folgende Funktionen können Sie selber einstellen:

- Auswählen der Hörprogramme
- Optional: Lautstärkeregelung mit Fernbedienung
- Ein-/Ausstellen des Gerätes: siehe Anleitung andere Seite

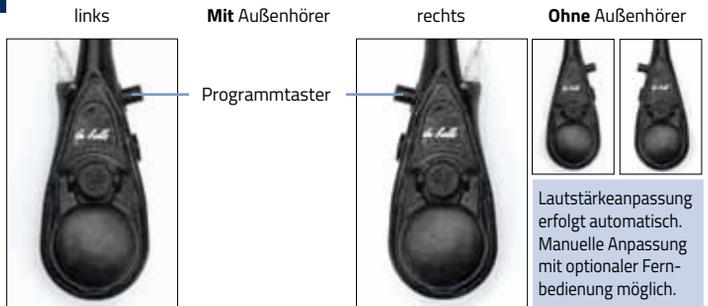


Einstelloptionen Bedienteil 3

Knochenleitung

la belle (Bedienteil oben/unten)

Folgende Funktionen können Sie selber einstellen:

- Einstellung der Lautstärke
- Ein-/Ausstellen des Gerätes: siehe Anleitung andere Seite

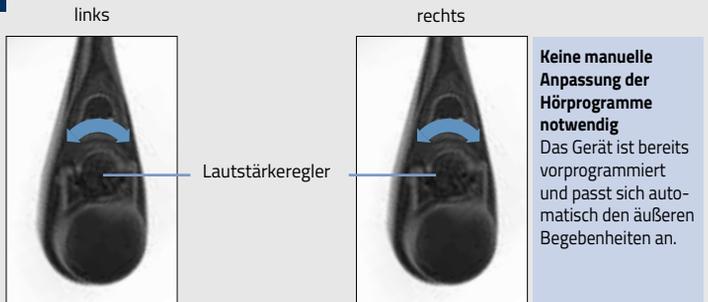

Einstelloptionen Bedienteil 4

Knochenleitung

la belle (Bedienteil oben/unten) junior headset

Folgende Funktionen können Sie selber einstellen:

- Einstellung der Lautstärke
- Auswählen der Hörprogramme
- Ein-/Ausstellen des Gerätes: siehe Anleitung andere Seite



Einstellmöglichkeiten Version 5

Knochenleitung

junior

Folgende Funktionen können Sie selber einstellen:

- Einstellung der Hörprogramme
- Einstellung der Lautstärke
- Ein-/Ausstellen des Gerätes: siehe Anleitung andere Seite

